


Provtagningspåsen innehåller:

- A *Provrör med streckkod*
- B *Förpackning med koksaltlösning*
- C *Träpinne/tops*
- D *Absorbent (används ej under provtagning, placeras enbart i liten påse (F) efter provtagning)*
- E *Provtagningsinstruktion (detta papper)*
- F *Liten påse "provpåse"*
- G *Stor påse (för att slänga använd tops etc.)*

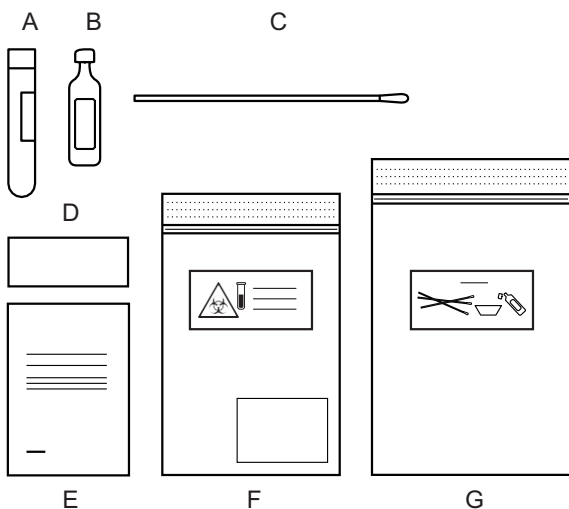

Instruktion för egenprovtagning av svalg



abclabs.se


In English

This document is available
in English at:

abclabs.se/howitworks


Förberedelse inför provtagning

1. Om du är snorig, snyt dig med din egen näsduk först.
OBS! Använd inte absorbenten (D).
2. Ta ut den lilla påsen märkt "provpåse" (F) och placera bredvid dig. Lägg innehållet från den stora påsen (G) på den lilla påsen (F).
3. Öppna topsförpackningen (C). Ta förpackningen med koksaltlösning (B) och öppna den genom att vrida av toppen.
4. Ta provröret (A). Öppna det och ställ korken med gängorna uppåt.
5. Töm koksaltlösningen (B) i provröret (A). Fortsätt hålla i provröret (A). Kasta den tomma koksaltförpackningen i den stora påsen (G).
6. Du ska nu genomföra en provtagning i svalg enligt instruktion nedan.

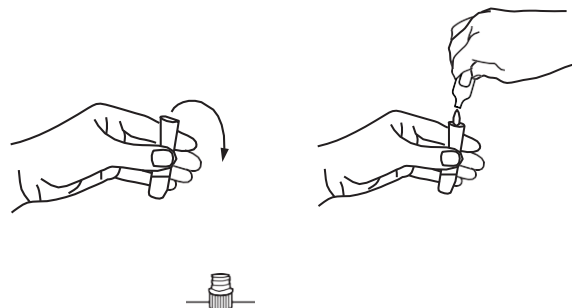

Svalg - provtagning

1. Ta topsen (C). För den längst insidan av kinden ner mot halsen så långt du kan på båda sidor. Skrapa med bomullstoppen ca 20 sekunder.
2. Stoppa ned topsen med bomullstoppen (C) i provröret (A) och rör runt ca 20 sekunder.
OBS! Lämna inte topsen i provröret.
3. Ta ur topsen (C) ur provröret (A) och släng den i den stora påsen (G).
4. Skruva noggrant på korken på provröret (A) och placera det i den lilla påsen märkt "provpåse" (F).
5. Lägg också ner absorbenten (D) i den lilla påsen märkt "provpåse" (F). Den kommer suga upp eventuellt läckage från provröret.

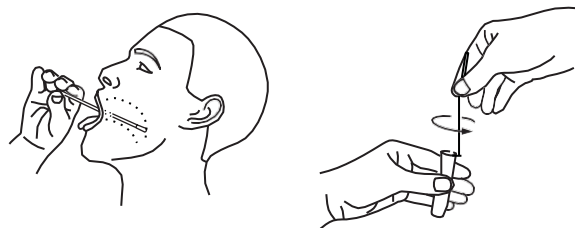

20 sek

20 sek

Efter provtagningen

1. Lämna in den lilla påsen märkt "provpåse" (F) på det sätt och på den plats som du fick besked om vid bokningen.
2. Kasta den stora påsen (G) med tops och resten av skräpet i hushållssoporna.

